

# Montaggio della Joëlette



1. Rimuovere la cintura di sicurezza e liberare il poggiatesta



2. Rimuovere il perno e la coppia dalla loro collocazione e far girare la ruota di 90°



3. Rimettere il perno nel suo asse e rimettere la coppia



4. Rimuovere la coppia di sicurezza e togliere l'asse



5. Abbassare i poggiapiedi al massimo con la leva di serraggio



6. Posizionare l'appoggiapiedi nelle fessure stringendo i due tubi al fine di inserirlo facilmente



7. Rimettere l'asse nella sua collocazione e bloccarlo con la coppia di sicurezza.



8. Posizionare la maniglietta in posizione orizzontale



9. Ruotare la Joëlette per farla poggiare sugli appoggi posteriori



10. Ruotare lo schienale, agendo sulla levetta di regolazione, finché la ruota tocca il terreno



11. Mettere la vite di un braccio nello schienale ed avvitare



12. Mettere l'altra vite al livello della seduta ed avvitare



13. Posizionare il cuscino della seduta



14. Far passare il sistema d'attacco sotto lo schienale e premere sugli automatici a pressione




15. Posizionare il cuscino dello schienale passando la fodera in tessuto dietro lo schienale e fissarlo con la striscia di velcro



16. Aprire i bracci laterali ed infilarle le due parti



17. Bloccare i bracci con la coppia di sicurezza di sicurezza

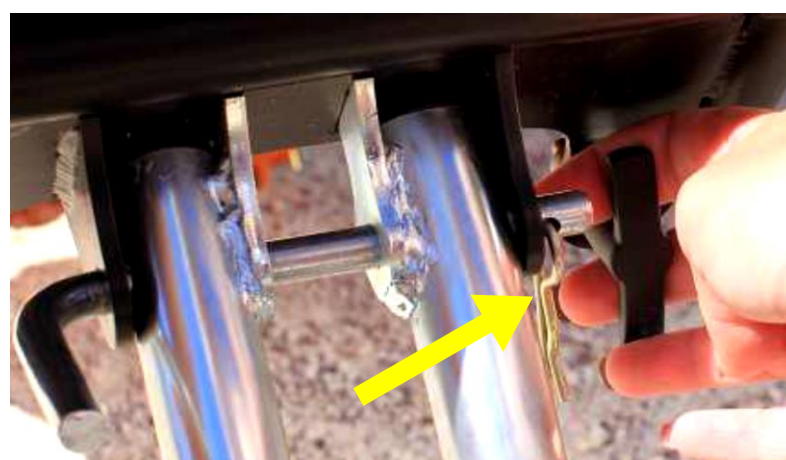

18. Ruotare la maniglietta in posizione verticale.



Per lo smontaggio della Joëlette, procedere in senso opposto.




# IMPORTANTE!

## Maniglia di sblocco (sotto la seduta)



Posizione **orizzontale** (sbloccata) in fase di montaggio, stazionamento e smontaggio.

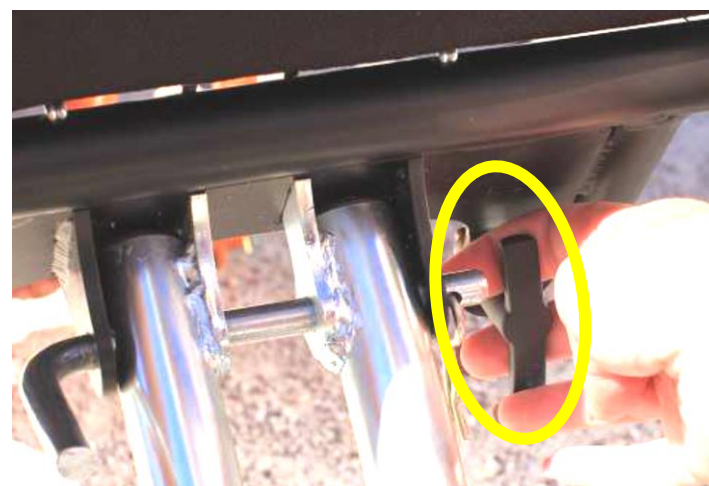

Posizione **verticale** (blocco seduta) durante la marcia.

## Marcia e Stazionamento



Nel passaggio da **stazionamento a marcia** tenere **sempre** il freno bloccato e aiutarsi con il piede



Nel passaggio da **marcia a stazionamento** tenere **sempre** il freno bloccato

**Prima di muoversi controllare SEMPRE che la maniglia sia in posizione verticale**