

Montaggio della Joëlette Terza Edizione "ADVENTURE"





1. Rimuovere la ruota, le cinghie di trazione, i bracci anteriori e i cuscini dalla borsa di trasporto.



2. Prendere il poggiapiedi, posizionarlo sul suo supporto infilando la vite nell'apposita scanalatura e bloccarlo con il perno e la coppiglia.



3. Sbloccare la levetta di sblocco (sotto la seduta) e ruotare la Joëlette appoggiandosi alle maniglie fino a quando i cuscinetti di supporto in gomma sono a contatto con il terreno.

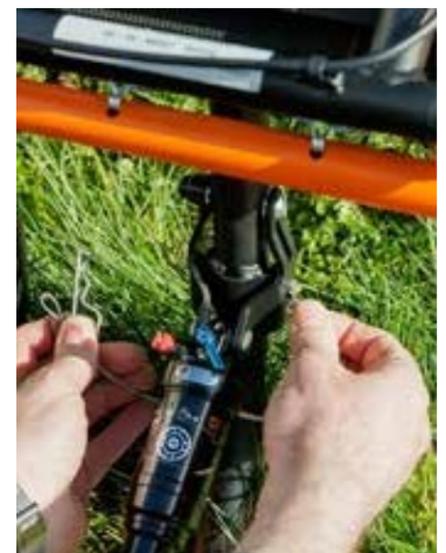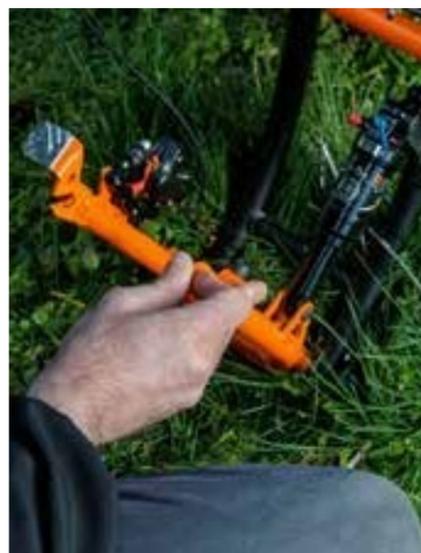

4. Rimuovere il perno indicato dalla freccia e aprire il forcellone in modo che i fori della staffa di montaggio dell'ammortizzatore coincidano con quelli del telaio.

5. Infilare completamente il perno in acciaio inox e fissare il gruppo con la coppiglia.



6. Rimuovere lo spessore in plastica posizionato tra gli inserti frenanti della pinza freno.

NB: fare attenzione a non stringere il freno senza lo spessore, prima dell'inserimento del disco del freno!!!



7. Posizionare la ruota tra le forcelle e fissarla con il bloccaggio rapido.



8. Aprire lo schienale e abbassare il manubrio, utilizzando la maniglia a sinistra, fino ad appoggiarlo sulla ruota.



9. Installare i due bracci anteriori utilizzando le viti di fissaggio laterali.



10. Posizionare i cuscini sul sedile e sullo schienale.




11. Far passare il lembo dello schienale dietro le cinghie elastiche e fissarlo con il velcro.



12. Fissare le fibbie laterali cucite sul sedile e ripiegare il pannello anteriore verso il basso.



13. Aprire e montare i due bracci laterali

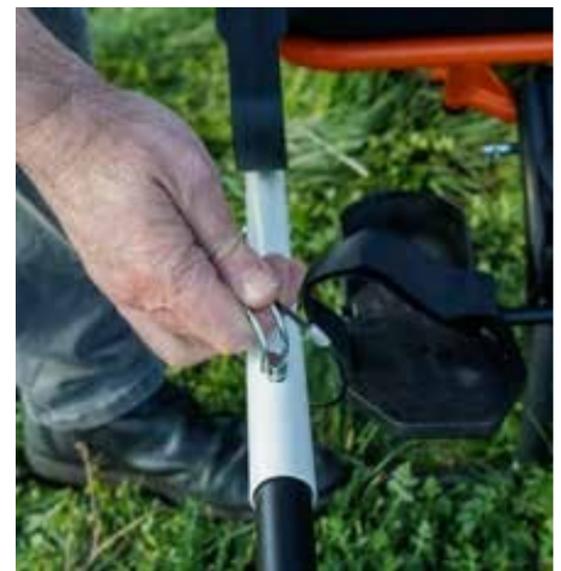

14. Bloccare i bracci con il perno di sicurezza.



La vostra Joëlette è pronta per l'utilizzo!

Per lo smontaggio, procedere in ordine inverso, facendo attenzione a non schiacciare le mani o le dita tra le parti in movimento.

Durante lo smontaggio fare attenzione a non schiacciare o piegare i tubi del freno e il cavo di regolazione del manubrio.

Un video è disponibile sul sito web

www.joeletteandco.com

IMPORTANTE!

Levetta di sblocco (sotto la seduta)



Posizione **rivolta in basso** (sbloccata) in fase di montaggio, stazionamento e smontaggio.



Posizione **rivolta in alto** (blocco seduta) durante la marcia.

Marcia e Stazionamento



Nel passaggio da **stazionamento a marcia** tenere **sempre** il freno bloccato e aiutarsi con il piede



Nel passaggio da **marcia a stazionamento** tenere **sempre** il freno bloccato

Prima di muoversi controllare SEMPRE che la levetta di sblocco sia rivolta in alto

Joëlette ADVENTURE

Manuale d'uso



<https://www.joeletteandco.com/wp-content/uploads/Notice-Joelette-Adventure-eMotion-IT.pdf>



Joëlette®
ADVENTURE

Joëlette®
eMOTION

C10P148-C10P153, Rev A, 30-06-2023.

Questo manuale deve essere consegnato all'utente del prodotto. Leggere il manuale PRIMA di utilizzare il prodotto e conservarlo per future consultazioni.
Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattuali e sono soggette a modifiche senza preavviso.

CE

Le foto mostrate in questo manuale non sono contrattuali.

Video montaggio

<https://www.youtube.com/watch?v=2GsVN-geXlk&t=2s>

